

Hűsítő fájdalomcsillapító tapasz, hidrogel

Élvezze a megkönnyebbülést és a hosszan tartó kényelmet hűsítő hidrogel tapaszainkkal! A mentol és a hidrogel kombinációja hatékony hűsítést biztosít, amely enyhíti a hát-, ízületi és izomfájdalmakat. Segít csökkenteni az izmok és inak merevségét vagy túlterhelését. A puha textil és a tapadó anyag lehetővé teszi az egyszerű felhelyezést, a tapasz biztonságosan a helyén marad, és maximális hatékonyságot biztosít. Kényelmes anyaga diszkrét és komfortos viselést nyújt egész nap.

Használat:

Tisztítsa meg és szárítsa meg az érintett területet, majd helyezze fel a tapaszt a kiválasztott helyre. Hagyja hatni legfeljebb 8 órán át.

Mindig csak 1 tapaszt használjon, naponta legfeljebb 2-t, legfeljebb 7 napig.

Ugyanarra a területre a következő alkalmazás 7–14 napos szünet után ajánlott.

12 év alatti gyermekeknél a tapasz csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.

Terhes és szoptató nők csak orvossal való konzultáció után használhatják.

A tapasz használatát abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni, ha:

- bőrreakciók, például kiütés, viszketés, bőrpír, irritáció, fájdalom, duzzanat vagy hólyagok jelentkeznek,
- az állapot rosszabbodik, vagy a tünetek 7 napnál tovább fennállnak,
- a tünetek elmúlnak, majd néhány napon belül visszatérnek.

Nem szabad használni:

- sérült bőrön,
- melegítő párnával együtt,
- nyálkahártyával, különösen a szemmel való érintkezéskor,
- ismert túlérzékenység esetén bármely összetevőre.

Összetevők: Tisztított víz, Glicerín, Mentol, Nátrium-hialuronát, Glükózamin-kondroitin, nem szőtt textil, ragasztóanyag.

Csak külső használatra. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvostechnikai eszköz.

Tárolás: Ne tegye ki közvetlen napfénynek, fagynak vagy túlzott páratartalomnak. Száraz helyen, legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Tapasz mérete: 7 × 10 cm **Csomag tartalma:** 2 db tapasz

Gyártó: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Henan tartomány, Kína

Európai képviselő: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Németország

Forgalmazó Csehországban: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Csehország, e-mail: fgroup@fgroup.cz

Forgalmazó Szlovákiában: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Szlovákia, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Web: www.fortepatch.com

CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Orvostechnikai eszköz.