

Hűsítő tapasz fejfájás és láz enyhítésére

Lázas vagy fáj a fejed? Bemutatjuk a tapaszt, amely hatékonyan segít enyhíteni a fejfájást és a lázat gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Innovatív hidrogel összetételének és hűsítő hatásának köszönhetően kellemes és tartós hűsítő érzést biztosít, anélkül hogy hűtőszekrényben kellene tárolni. Azonnali megkönnyebbülést nyújt, kíméletes a bőrhez és könnyen használható.

Alkalmazza fejfájás, megemelkedett testhőmérséklet, fáradtság vagy túlmelegedés esetén. A tapasz nem gyógyszer, hanem a panaszok átmeneti enyhítésére szolgál. Használja meleg időben vagy fizikai megterhelés után hűsítő hatásként. Szagtalan és gyógyszermentes. Tartsa mindig kéznél!

Használat: Tisztítsa meg és szárítsa meg az érintett területet. Távolítsa el a védőfóliát, és helyezze a tapaszt a homlokra vagy a nyak hátsó részére. Kerülje a hajjal borított részeket. Egyszerre mindig csak 1 tapaszt használjon, legfeljebb 2-t naponta, legfeljebb 7 napon keresztül.

12 év alatti gyermekeknél a tapasz csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Terhes és szoptató nők csak orvosi konzultáció után alkalmazhatják.

A tapasz használatát abba kell hagyni, és orvosi segítséget kell kérni, ha:

- bőrreakciók jelentkeznek, például kiütés, viszketés, bőrpír, irritáció, fájdalom, duzzanat vagy hólyagok,
- az állapot romlik, vagy a tünetek 7 napnál tovább fennállnak,
- a tünetek elmúlnak, majd néhány napon belül újra megjelennek.

Figyelmeztetés:

- Ne használja sérült bőrön.
- Ne használja melegítő párnával együtt.
- Kerülje a nyálkahártyával való érintkezést, különösen a szemmel.
- Ne használja, ha ismert túlérzékenység áll fenn bármely összetevőre.

Összetevők: Mentha, Glicerín, Tisztított víz, CMC emulzió, nem szőtt textil, ragasztóanyag.

Csak külső használatra. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvostechnikai eszköz.

Tárolás: Ne tegye ki közvetlen napfénynek, fagynak vagy túlzott páratartalomnak. Száraz helyen, legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Méret: 5 × 12 cm **Csomag tartalma:** 1 db tapasz

Gyártó: Zhengzhou Yupintang Medical Instrument Co., Ltd., No. 27, Fenglin Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou City, Henan tartomány, Kína

Európai képviselő: Evertbiz GmbH, Landsberger Str. 155, 80687 München, Németország

Magyarországi forgalmazó: F.group partner, s.r.o., Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Csehország, e-mail: fgroup@fgroup.cz

Szlovákiai forgalmazó: Fazzini group, a.s., Bulharská 42, 917 01 Trnava, Szlovákia, e-mail: fazzini@fazzini.sk

Web: www.fortepatch.com

CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Orvostechnikai eszköz.